



2023 אפריל 2

אל: צוותי סיעוד אונקולוגי – בתי חולים וקהילה  
העתק: העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

הנדון: רענון הוראות יצרן ב שימוש במחט Port A Cath ל Gripper.

מס' פנייה למשרד הבריאות: 242300323

שלום רב,

מחטי Gripper מסופקות בארץ ע"י חברתנו משנת 1989 ונמצאות בשימוש רחב בבתי החולים והמרכזים הרפואיים בארץ.

בשבוע שעבר נודע לנו על שתי תקריות בהן הגיעו המטופלים למיון לאחר שההברגה של ה "Y-Site" השתחררה.

תקריות אלה מלמדות אותנו כי יש לרענן הוראות שימוש.

מפנה את תשובת ליבכם לעלון הוראות השימוש הנמצא בכל קופסה של גריפרים:

תחת כותרת אזהרות:

**"Fully tighten Y-site injection cap before each use"**

**" הדק באופן מלא את הפקק של אתר ההזרקה הנוסף לפני כל שימוש"**

מצורף בזאת העלון, לעיונכם.

לנוחיותכם מצורפת תמונה להמחשה:



בברכת חג שמח,

יעל פינטל - 0549464160

ענת דוד – 0544820476